


קל להקשיב, קל להתרכז

nancehearing
Sound Selector

הרצאה


מעקב אוטומטי אחר תנועת המורה
בחזית בלבד

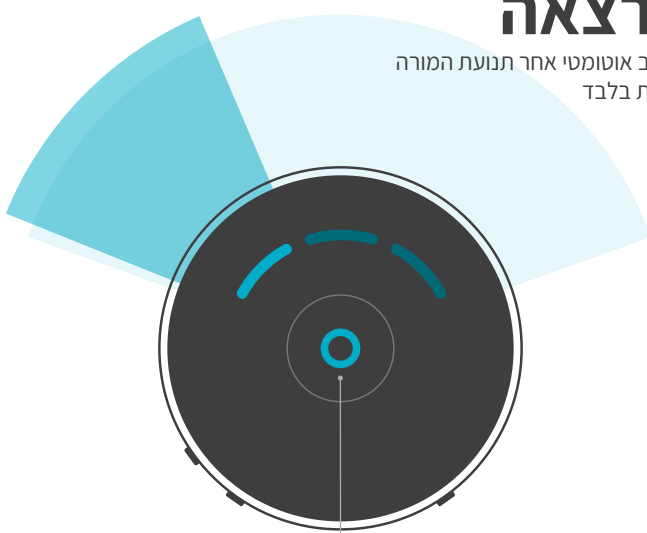

לחיצה במרכז
כדי לעבור בין הרצאה לדין

דין


מעקב אוטומטי אחר הדובר/ת הנוכחי/ת
בכל הכיוונים

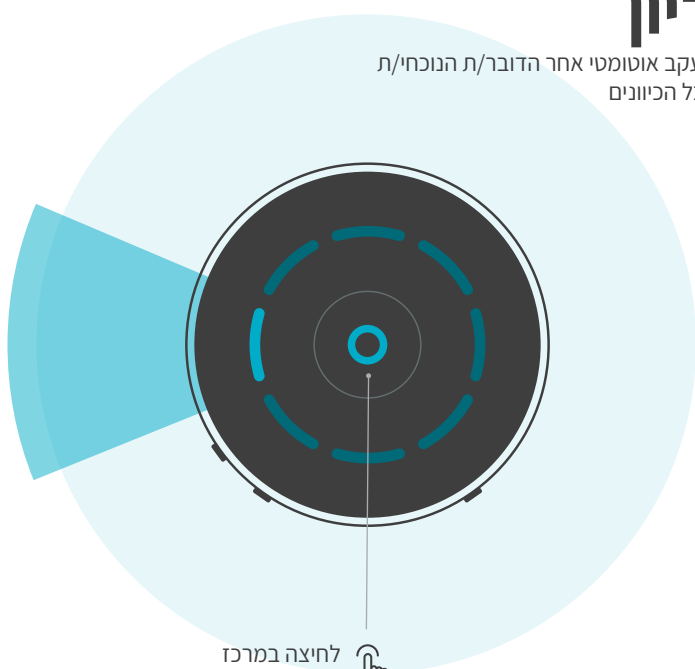

לחיצה במרכז
כדי לעבור בין דין להרצאה

שיחה


בחירה ידנית של עד שני דוברים

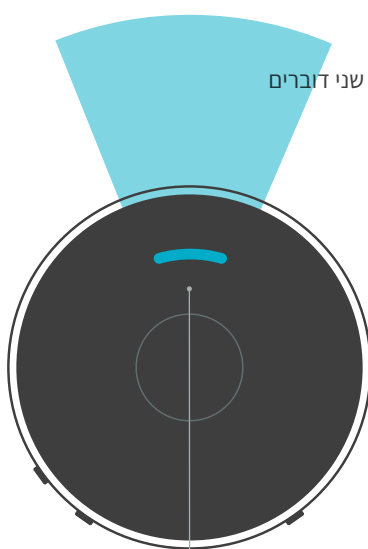

לחיצה על מקטע
כדי לשמוע דובר מסוים


סוללה וטעינה

טעינה באמצעות Micro USB

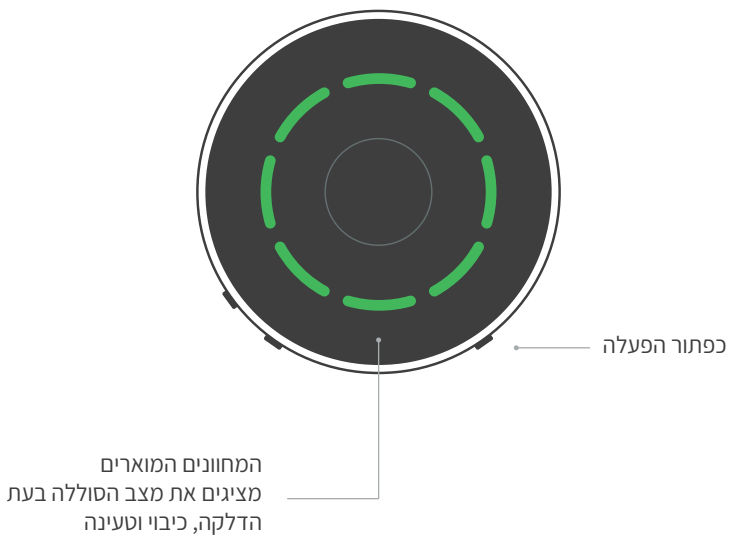

עוצמת שמע


מומלץ לכוון את עוצמת השמע כך שתישמע טבעית עוצמת שמע גבוהה מדי עלולה להגביר רעשי רקע וקולות שאינם רצויים

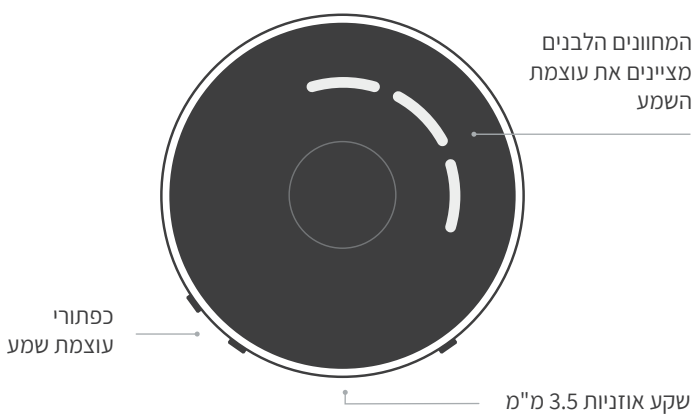

אזהרה: האזנה ממושכת בעוצמת שמע גבוהה עשויה להביא לכך שאוזניך יתרגלו לעוצמה זו. דבר זה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לשמיעתך, זאת מבלי לחוש באי נוחות כלשהי.

אוזניות

ניתן להשתמש בכל אוזניות עם מחבר אודיו 3.5 מ"מ

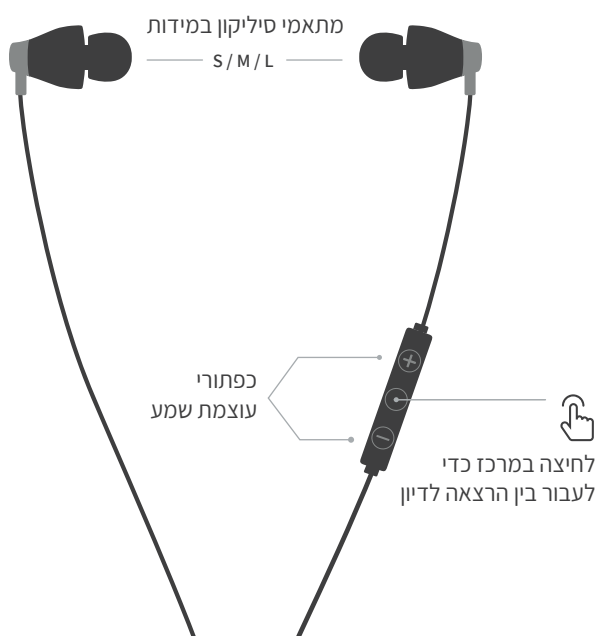

בהצלחה בלימודים!

אנו זמינים עבורך לכל דבר ועניין

support@nuancehear.com

nuancehear.com

077-9018642

nuancehearing
Sound Selector