

**Voice Selector Study כולל אוזניות חוטיות**

## הוראות בטיחות

### אופן השימוש במוצר

Voice Selector Study כולל אוזניות חוטיות הוא מכשיר עזר ייחודי להפחתת רעשים סביבתיים ולמיקוד השמע בכיוון הרצוי. המכשיר מיועד להפעלה ולאחסון בטמפרטורות שבין 10° ל-45° צלזיוס ובלחות יחסית של 10% עד 95%.

### אופן הניקוי

יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית לכה.

### הוראות לסילוק ציוד אלקטרוני

יש לטפל בפסולת אלקטרונית לפי התקנות המקומיות. חברת Nuance Hearing Ltd. מעודדת את מחזור המכשיר או את הטיפול בו באמצעות סילוק מקומי של ציוד אלקטרוני. יש לפעול בהתאם לחוקים המקומיים.

### על פי התקנות אנו נדרשים לספק את האזהרות הבאות:

- אזהרה: האזנה ממושכת בעוצמת שמע גבוהה אינה מומלצת ועלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בשמיעתך
- אזהרה: שימוש באביזרים, רכיבים או חלקי חילוף שאינם מסופקים על ידי היצרן של Nuance Hearing עלולים לגרום לפגיעה באיכות הפעולה ובתנאי האחריות
- הסוללה ב-Voice Selector Study אינה ניתנת להחלפה ואין לנסות להחליפה

### תקינה

המוצר עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים של בטיחות חשמל ותאימות אלקטרומגנטית.

