


nuance
hearing | Voice Selector
Converse

Conversation made easy


איך מתחילים?

① יש להרכיב את האוזניות וללחוץ על כפתור ההפעלה
כעת יישמע: "Power on"

② יש ללחוץ על כפתור ההפעלה

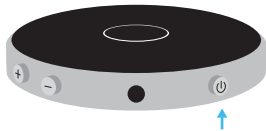

מקרא:

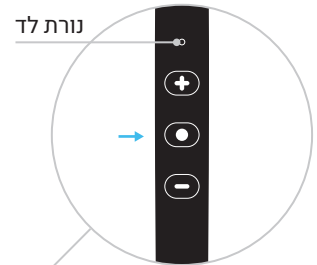


מקרא:

- אדום מהבהב
חיפוש מכשיר בסביבה
- כחול מהבהב
נמצא מכשיר
כעת תשמעו: "Connected"

דיון קבוצתי

Voice Selector Converse סורק את הכיוונים הפתוחים ובוחר אוטומטית את הדובר המרכזי

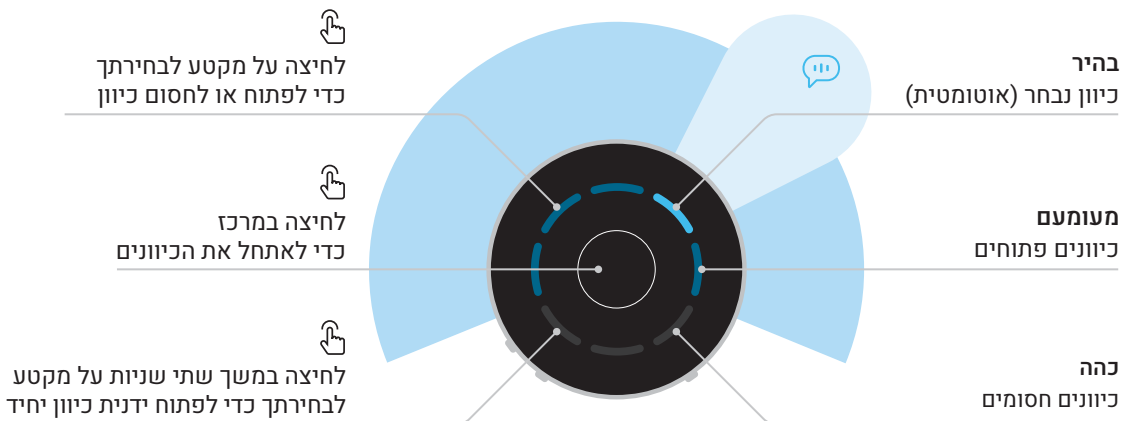

כיווניות המוצר: המקטעים הפתוחים ממוקמים מול הקבוצה, המקטעים החסומים ממוקמים מולכם

טלוויזיה בסטרימינג

להאזין לטלוויזיה להנאתך בעוצמת שמע מתאימה




שיחה אחד על אחד

להאזנה מיטבית, ניתן לתת לשותפך לשיחה לענוד את Voice Selector Converse




התאמת עוצמת השמע

כדי ליהנות מחוויה מיטבית, יש לכוון את עוצמת השמע כך שהצלילים יישמעו לך טבעיים (עוצמת שמע גבוהה מידי עשויה להגביר רעשי רקע וצלילים לא רצויים)

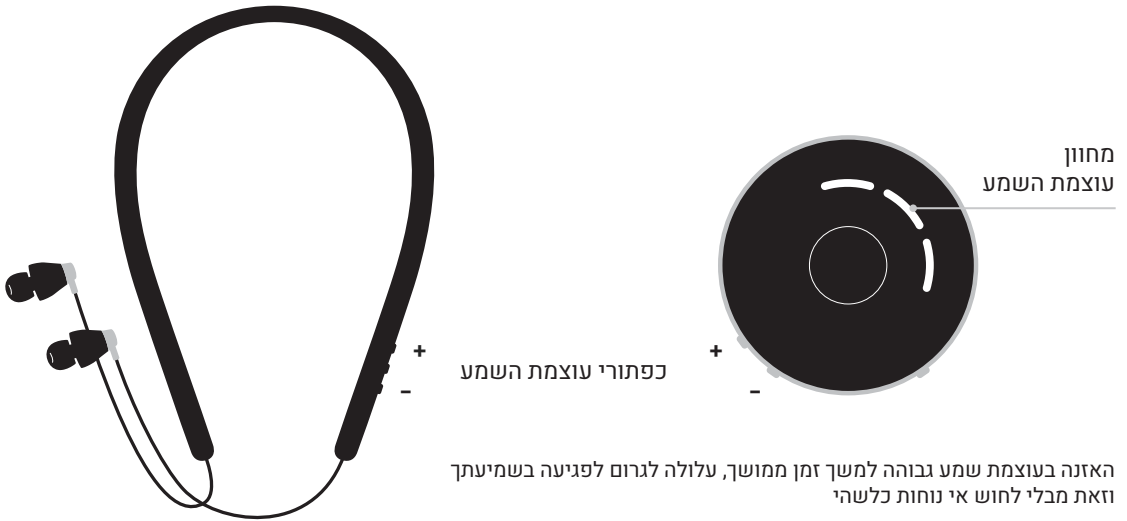


הטענה

יש להשתמש בכבל ה-Micro-USB בכדי לטעון את Voice Selector Converse ואת האוזניות

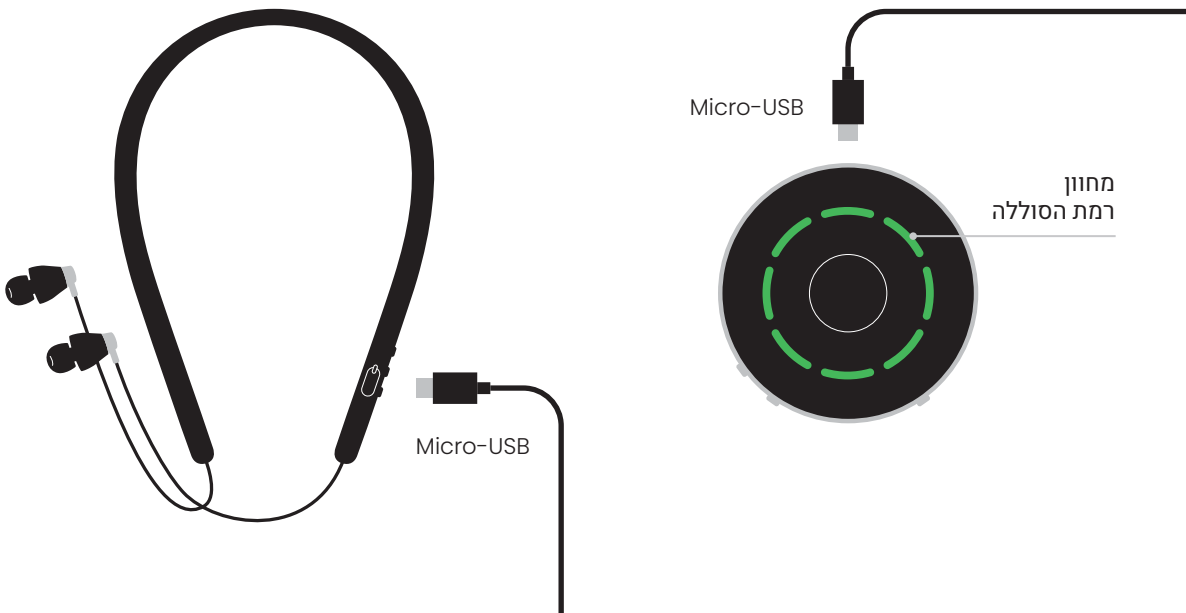

התאמת האוזניות

להתאים בצורה הטובה ביותר את האוזניות לאוזניים שלך

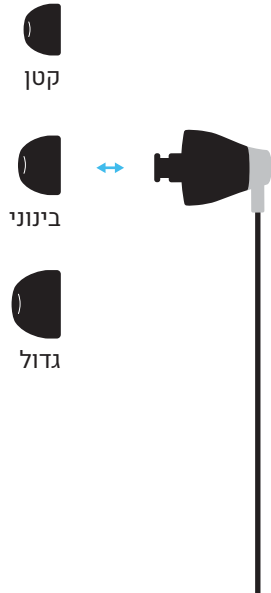

כדי להסיר את הקצה, יש למשוך בחוזקה
כדי לחבר קצה, יש לחבר וללחוץ עד שישמע "קליק"

התאמה טובה תפחית את רעשי הרקע
ותשפר את הבנת הדיבור

אפליקציית Voice Selector Converse


ליהנות מאפשרויות נוספות באפליקציה




יש לסרוק את
QR code-ה



שימוש בטלפון
כשלט רחוק למכשיר

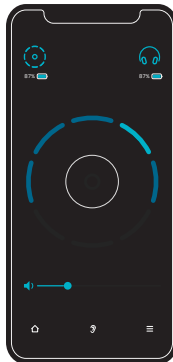

ביצוע בדיקת שמיעה
כדי ליצור פרופיל
שמיעה אישי

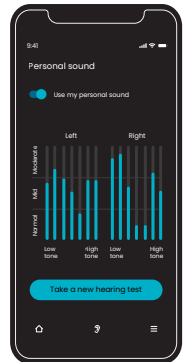

כל הזכויות שמורות לניואנס שמע בע"מ 2021. ניואנס שמע הוא סימן מסחרי של ניואנס שמע בע"מ.
אין לשכפל את תוכן מסמך זה ללא אישור בכתב של חברת ניואנס שמע.